

ACCESORIOS PARA EL HORNO LT 02/13 CR PARA LA SINTERIZACIÓN DE COBALTO Y CROMO



SKU: N / A | **Categorías:** [Dental](#), [Horno para la sinterización de cromo y cobalto LT 02/13 CR](#), [Nabertherm](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Tenazas especiales, Longitud: 250 mm
Número de artículo: 699001189



Kit de campanas de sinterizar, Ø 95 x 50 mm
Número de artículo: 699001186

11



Perlas de sinterizar
Número de artículo: 699001185

Kit de campanas de sinterizar, Ø 95 x 50 mm
artículo: 699001185

perlas de sinterizar Número de
Tenazas especiales, Longitud: 250 mm

Número de artículo: 699001189 *Campana de sinterizar para horno de sinterizar LT 02/13 CR*

Para el sinterizado de restauraciones NEM con Argón, se emplea una campana de sinterizar con un buen sellado. La campana de sinterizar, está fabricada de material duradero y de bajo desgaste, de SiC. El material a sinterizar, se coloca dentro de la campana y se sinteriza en atmósfera de Argón. Se pueden colocar hasta 30 piezas por proceso. Gracias a la forma de construcción especial, en combinación con las perlas de sinterizar, se obtienen buenos resultados de sinterización en una atmósfera prácticamente libre de oxígeno y con un consumo reducido de argón.

Perlas de sinterizar para el horno de sinterizar LT 02/13 CR

El uso de perlas de sinterizar, gracias a su efecto reductor, proporciona resultados optimos en el recipiente de sinterizar. Además, estas perlas impiden que las fundas y los puentes se adhirieran o queden enganchados durante el proceso de sinterizado. Preste atención a que las estructuras y las fundas individuales estén cubiertas con perlas de sinterizar hasta el

borde de la funda; no obstante, las perlas no deben introducirse en el interior de las fundas porque eso podría obstaculizar la contracción durante el sinterizado.

Tenaza especial para cargar la campana de sinterizar

Está prevista una tenaza de copa especial para cargar y descargar el horno. Esta tenaza permite extraer de forma sencilla la campana de sinterizar de la cámara de sinterizar. Nota: Los medios auxiliares de cocción arriba descritos están diseñados para la carga y la extracción en frío. No es admisible una descarga en caliente.

Control de Proceso y Documentación

Dental

[Laboratorio Dental](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO